


# ¿Problemas por manchas de fluorosis, beber o fumar?

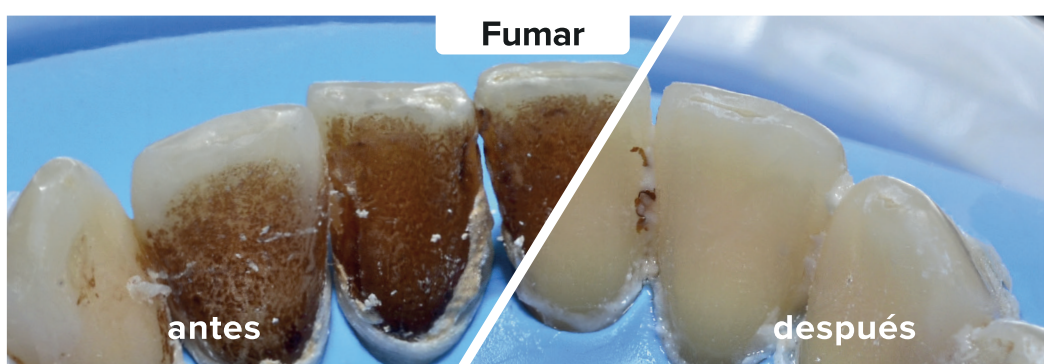

## Antivet<sup>®</sup> Kit

### ¡ es la solución !



Efectivo y confiable desmanchador dental, en una sola sesión de consultorio

Actúa directamente sobre las manchas que ocasiona la fluorosis por ionización, fumar o beber, sin desgastar el esmalte, de manera muy rápida y permanente.

Reg. No. 1522C2013 SSA  
Pat. No. 299512

# Antivet® Solución a las manchas de fluorosis

La solución **ANTIVET®** está especialmente formulada para realizar la limpieza de piezas dentarias que presentan pigmentación (manchas parduzcas) en la superficie del esmalte a causa de la fluorosis\* dental.

Su fórmula base ácida, es estabilizada químicamente a un pH controlado, el necesario para que reaccione con los iones positivos formando sales, fundamento mediante el cual limpia la estructura del esmalte de los dientes sin afectarla, ya que solamente extrae los iones de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran ocupando los espacios que existen entre los cristales poco calcificados de fluorapatita.

El sistema y el producto, están debidamente patentados, en México y en varios países del mundo.

## Ventajas

- No afecta el esmalte.
- Limpieza permanente de la pieza dentaria.
- Resultados en la primera sesión con el odontólogo.
- No produce sensibilidad.
- Producto controlado por Cofepris bajo el Reg. 1522C2013 SSA.

La solución limpiadora Antivet, no tiene ninguna vía de absorción por el organismo humano durante su aplicación, comprobación efectuada mediante estudios y practica durante la limpieza del esmalte de los dientes, por tal motivo no existe ningún grado de toxicidad para este si se usa como el procedimiento lo indica, tampoco hay riesgo de acción mutagénica, carcinogénica o teratogénica ni de grado de acumulación y efecto residual.

## Ventajas competitivas de Antivet®

### Tabla comparativa contra otros sistemas

Tipo de tratamiento	Una sesión de consultorio	Aplicación simple	No daña el esmalte	Sin efectos secundarios	Elimina las manchas de modo permanente
ANTIVET®	✓	✓	✓	✓	✓
Micro abrasión	?	?	X	X	?
Gel peróxido de hidrógeno (*a)	X	?	✓	✓	✓
Gel peróxido de carbamida (*b)	X	?	✓	✓	✓
Carillas de cerámica	?	X	?	X	✓

**ANTIVET®, tecnología única en el mundo formulada con materiales que no dañan los dientes, ni el medio ambiente**

(\* A) BLANQUEAMIENTO EN CONSULTA. 20-37% GEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, AUTO ACTIVADO O ACTIVADO POR CALOR O LUZ.

(\* B) BLANQUEAMIENTO SUPERVISADO POR UN PROFESIONAL Y APLICADA POR EL PACIENTE EN CASA. 10-35% GEL PERÓXIDO DE CARBAMIDA.



[www.antivet.com](http://www.antivet.com)



**Guadalajara (Matriz)**  
 Industria del Plástico 2113  
 Fracc. Industrial Zapopan, Norte  
 Zapopan, Jalisco, México.  
 mdc@dental.com.mx  
 +52 (33) 3833-0333

**CDMX**  
 Alzate 118, Eje 1 Norte  
 Col. Santa María de la Rivera  
 Delegación Cuauhtémoc  
 mdcemex@dental.com.mx  
 +52 (55) 5547-4747

**Estados Unidos**  
 17800 S. Main St. 201  
 Gardena CA, USA 90248  
 customerservice@mdcdental.com  
 011 (310) 352 6980



[www.dental.com.mx](http://www.dental.com.mx)

01 (800) 3637-800