

INVESTIMENTO TALLADIUM GALAXY II



MAYOR
RESISTENCIA



REVESTIDO MÁS
FÁCIL Y RÁPIDO



SIN CAPA DE
REACCIÓN

Galaxy II es un investimento universal que se puede utilizar para todas las piezas de fundición de metal y prensas de disilicato de litio / feldespático

**LOS TÉCNICOS LO PREFIEREN PORQUE NO DEJA
CAPA DE REACCIÓN EN SUS PRENSADOS**



Caja 100 sobres de 100g y 4 líquidos de 473ml c/u

COLADOS CERÁMICOS

Ni - Cr

PROPORCIÓN



17ml
líquido



6ml
Agua



FRAGUADO EN TAN SOLO
15 A 20 MINUTOS

PRENSADO DISILICATO

Lisi

PROPORCIÓN



12ml
líquido



11ml
Agua



FRAGUADO EN TAN SOLO
15 A 20 MINUTOS

TÉCNICA: DESENCERADO "FAST-BURNOUT"

Talladium fue pionero en el "fast-burnout" cera a metal en 30 minutos, **revestido rápido y fácil**

DESENCERADO



Cubilete **100 g** > **30 Minutos**

Cubilete **200 g** > **1 Hora**

TÉCNICA: DESENCERADO CONVENCIONAL